



SCB
MÉXICO

ESCUDOS CON TECNOLOGÍA QUE CUIDA TU SALUD

R-98 Medical

GUIA DE USO



PROTECCIÓN EN SERÍO

- Doble jareta para sellado perfecto.
- Escudo protector antiadherente.
- Doble filtro, lavable e intercambiable.
- Respiración separada de boca y nariz.


www.supercubre bocas.com



100% reciclable

GUIA DE USO

Escudo de polipropileno antiadherente.

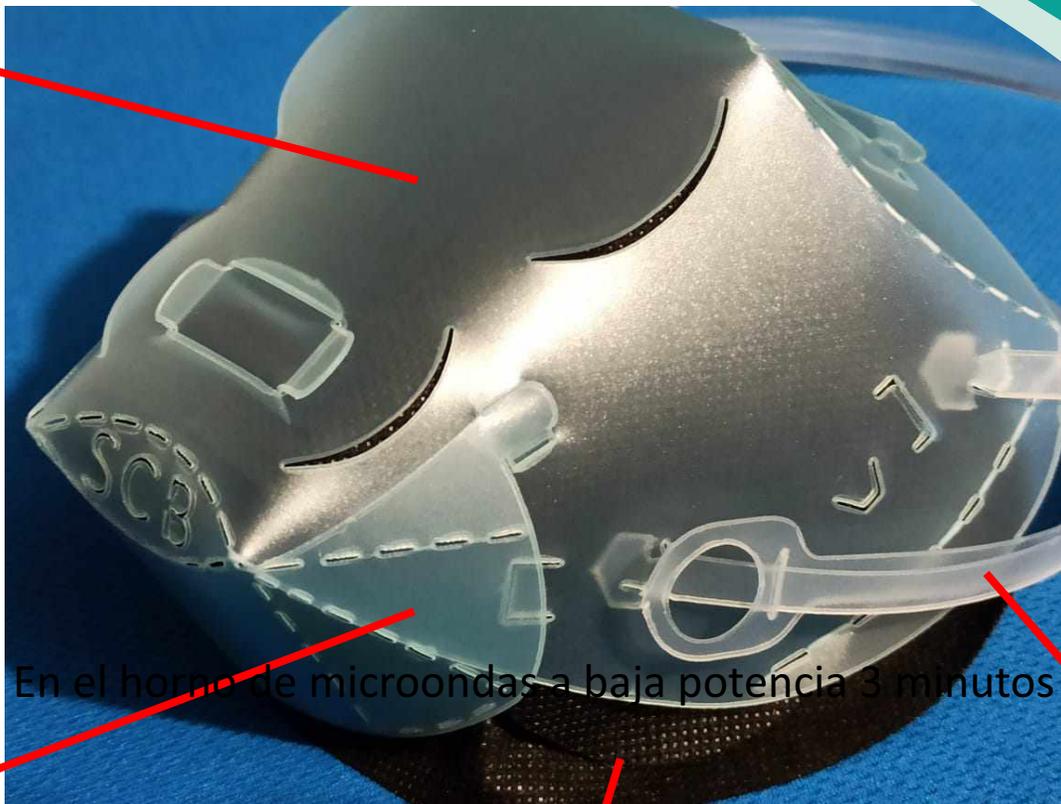

En el horno de microondas a baja potencia 3 minutos

Ajuste de la altura de la barbilla

Jaretas ajustables que rodean la cabeza. Son más cómodos y práctico que las ligas.

Par de filtros de polipropileno nowowen impermeable, repelente, lavable.

COMO SANITIZARLO

Cada juego de filtros se puede desinfectar a diario por hasta un mes con cualquiera de estos métodos:

- Hervir completo por 3 minutos.
- En agua con cloro por 3 minutos.
- Asperjado con alcohol y dejar 3 minutos.

Reutilizable, se sanitiza al

99.99%

Comprobado en laboratorio



Enseguida secar como prefiera:

- Con un paño de algodón, o de papel absorbente.
- En el horno de microondas a baja potencia 3 minutos.
- Con una pistola de secar cabello, nivel bajo.

GUIA DE USO

R-98 Medical


Dos niveles de ajuste para el ancho de la cara.

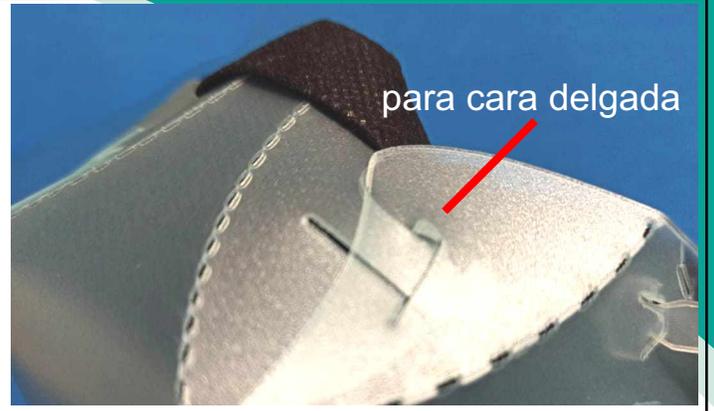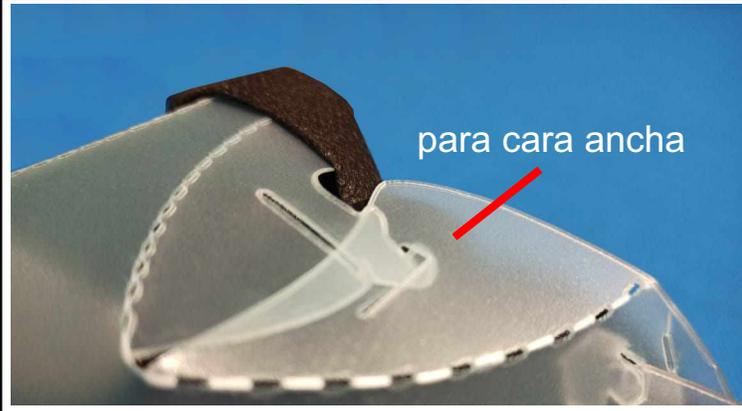


Ajuste de tamaño de nariz



Sujetador del filtro

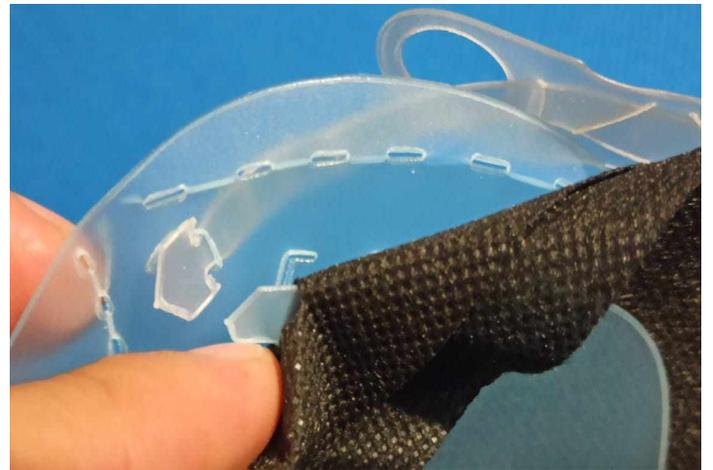

Unión de las partes del escudo

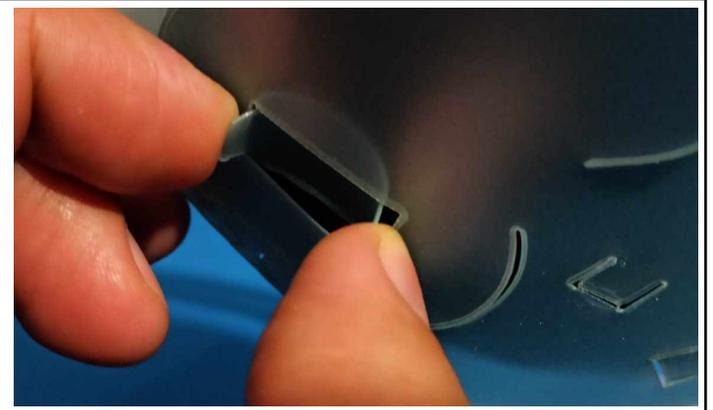

Ajuste de la jareta

